



آدرس دفتر: تهران، شهریار، خیابان انقلاب، بن بست ناصح، پلاک ۲۵۸

آدرس کارخانه: تهران، شهرک صنعتی صفادشت، خیابان پولادسازان،
بعد از دانشگاه آزاد، روبروی دیوار شرقی شرکت اورند پیشرو

خط ویژه شرکت: ۰۲۱-۵۴۴۰۷۰۰۰ تلفن شرکت: ۰۲۱-۶۵۲۹۹۱۴۱-۴۲

تلفن دفتر فروش: ۰۲۱-۶۵۲۶۶۷۶۲ فاکس: ۰۲۱-۶۵۲۲۷۶۵۱

Web: www.ramshinchemie.ir Email: info@ramshinchemie.ir

رامشینی شیمی

کنترل عفونت وظیفه ماست

گروه صنعتی ایران تکنیک با ۳۰ سال سابقه کار در صنعت کشور، سال ۱۳۸۴ رشته ای از کار خود را به تولید تجهیزات پزشکی و محلول های ضد عفونی کننده انتقال داد و اکنون شرکت رامشین شیمی با ۱۳ سال سابقه کاری موفق به نوآوری و اختراعات در زمینه تجهیزات و محلول های ضد عفونی بیمارستانی شده است. فعالیت های این شرکت به صورت مختصر به شرح ذیل می باشد:

- اولین تولید کننده انواع DISPENSER در ایران
- اولین تولید کننده انواع DECOBOX (ظروف غوطه وری) در خاورمیانه
- اولین تولید کننده SAFETY BOX مقوایی سازگار با محیط زیست NANO TECHNOLOGY
- اختراع جهانی دیسپنسر چشمی، فوق العاده دقیق و حساس، نسل جدیدی از این نوع در مراکز بهداشتی دنیا تحولی عظیم اعمال خواهد کرد.
- تولید انواع محلول های ضد عفونی پایه الکلی و آمونیوم چهار تایی با کیفیت و برابری با بهترین برند های خارجی و قیمت های باور نکردنی که ان شاء الله هدیه ای باشد از طرف پرسنل شرکت رامشین شیمی به نام پاور سپت به جامعه پزشکی کشور و مردم ایران تقدیم می کنیم.
- امید است در آینده ای نه چندان دور اختراعات و نوآوری های این شرکت برای بهبود کیفیت تجهیزات پزشکی و سلامت جامعه در دسترس عموم قرار گیرد که این امر مهم میسر نمی شود جز با دعای خیر مردم ایران عزیز.

با سپاس
حسن رامشینی
مدیرعامل شرکت رامشین شیمی



پاور سپت

پاور سپت یک آنتی سپتیک موثر برای ضدعفونی کردن اطمینان بخش دست ها در بخش های مختلف مراکز درمانی مانند بخش های بیمارستانی، درمانگاهی از جمله اتاق عمل، ICU، بخش های عفونی، اتاق پانسمان، آزمایشگاه های تشخیص عفونی، اسکراب جراحی در اعمال جراحی، مطب های پزشکی و دندان پزشکی می باشد. این محصول می تواند حتی در خارج از محیط های درمانی نیز برای ضدعفونی کردن دست مورد استفاده قرار بگیرد.

ویژگی فرآورده

پاور سپت یک محصول آماده استفاده ضدعفونی کننده دست بر پایه اتانول ۷۶٪ محلول (از مشهورترین و پرکاربردترین مواد ضدعفونی کننده در جهان می باشد) و با وجود مواد موثر گلیسیرین، ترکیبات نرم کننده و مرطوب کننده، تقویت کننده پوست و ضمن ایجاد PH سازگار با پوست از هر گونه خشکی دست و ایجا مواد مضر بر پوست جلوگیری می کند، از ویژگی های این فرآورده سرعت بالای ضدعفونی کردن دست ها در (۳۰ ثانیه) و اسکراب جراحی در (۷۵ ثانیه) و همچنین فاکتور کنترل تصدیق پوست می باشد و به دلیل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی این ترکیب طبیعی و اثر طولانی ماندگار، جایگاه ممتازی در میان انواع ضدعفونی کننده های متداول دارد.

طیف فعالیت میکروبیولوژی و ضد میکروبی

پاور سپت یک محلول ضدعفونی کننده با مواد موثر و طیف عملکرد گسترده بر اغلب گروه های عفونی (ویروس ها، باکتری ها و قارچ ها) می باشد. این محلول یک باکتریسیدال (باکتری کش) و باکتریسید و یک باکتریواستاتیک قوی می باشد. این محلول یک germicide سریع و موثر با گسترده ترین طیف اثر (۹۹/۹٪) در کمترین زمان تماس (۱۵ ثانیه) بوده و به همین دلیل در زمره موثرترین محصولات anti microbia طبقه بندی می شود. این محصول بر باکتری هایی با منشاء نباتی و همچنین بر باکتری های +gram و -gram موثر بوده و این دایره تاثیر شامل باکتری های پاتوژن، ژیاتیو، پسودومانا، ائروزونا، سراسیا سالون لاتینی، استاف اورئوس می شود. این محصول یک قارچ کش (fongicide) است و انواع آن را به طور موثر و سریع از بین می برد و همچنین موثر بر ویروس های هپاتیت C، B، HIV (ایدز) و همچنین موثر بر ویروس های پوشش دار می باشد این محصول در برابر استافیلوکوک ها و سالمونلا موثر است.

مزایا

این محصول سریع الاثر بر میکروارگانیسم ها، غیر سمی و بر خلاف اغلب ضدعفونی کننده های دیگر هیچ گونه تاثیر منفی بر دستگاه تنفسی و یا آلرژی زایی ندارد.

۱ این محصول غیر خوراکی بوده و مصرف آن لک و اثری بر جایی نمی گذارد.

۲ این محصول آماده مصرف و نیاز به رقیق سازی ندارد.

۳ استفاده از این محصول به دفعات زیاد در روز هیچگونه مشکل پوستی ایجاد نخواهد کرد.



مقدار و نحوه مصرف

هنگام استفاده از محلول برای مصرف، دست ها را شسته و کاملاً خشک نمایید و سپس مقدار ۳ میلی لیتر از محلول را بر دست ها اسپری کرده و مدت ۳۰ ثانیه مالش دهید و در مورد اسکراب جراحی لازم است این مقدار را به ۹ میلی لیتر رسانده و مدت ۹۰ ثانیه دست ها مالش داده شود تا محیط پوست کاملاً ضد عفونی گردد و برای حصول اطمینان می تواند در مورد اسکراب جراحی مالش دادن را با سه مرحله و در هر مرحله اسپری حداقل ۵ میلی لیتر به انجام رسانید.

مواد تشکیل دهنده

ایزو پروپانول، بنزوالکانیوم کلراید، Carbomer، CTAB، اتانول، گلیسرین و مقدراری اسانس (محلول دست های حساس فاقد رنگ و اسانس می باشد).

شرایط نگهداری

دور از نور خورشید و منبع حرارتی نگهداری و درپوش آن پس از استفاده بسته شود. زمان پایداری این محصول به مدت دو سال از تاریخ تولید می باشد.

هشدار




- این محصول صرفاً برای استعمال خارجی بر روی پوست سالم می باشد.
- این محصول بر روی ویروس های بدون پوشش به ویژه هیپاتیت A تاثیر نداشت و همچنین بر علیه اسپورها (هاگ ها) فعالیت ندارد و صرفاً از تبدیل آن به رویشی جلوگیری می کند.
- از استنشاق و بلعیدن آن و از اسپری بر روی آتش خودداری شود.

بسته بندی

محلول ضد عفونی پاور سپت در ظروف پلی اتیلن ساخت شرکت رامشین شیمی در سایزهای ۱۰ (جیبی)، ۵۰، ۱۲۵، ۲۵۰، ۱۰۰۰، ۵۰۰۰، ۱۰/۰۰۰، ۲۰/۰۰۰ سی سی عرضه می گردد. با توجه به سفارش مشتری این ظروف می تواند با پمپ بوده (هر گونه پمپ رقیق و غلیظ پاش و اسپری) یا با درب فلیپ تاپ و یا درب ساده ارائه گردد.

تاییده

این محصول دارای پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو می باشد.

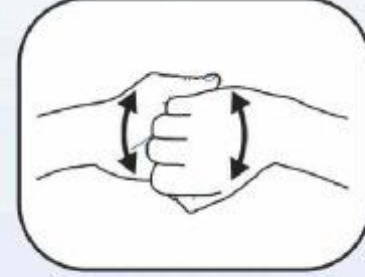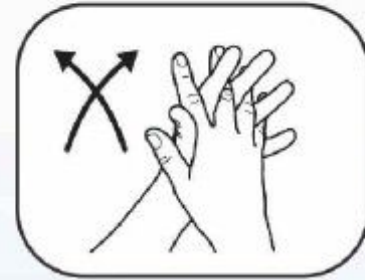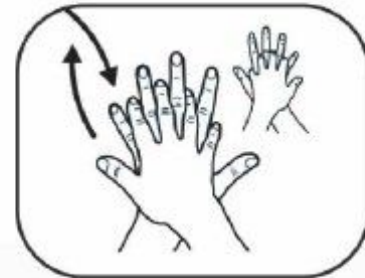



پاور سپت کوئیک Quick Powersept

محلول ضد عفونی کننده الکلی آماده به مصرف جهت اسپری کردن بر روی سطوح، ابزار، وسایل پزشکی و دندان پزشکی بدون نیاز به آبکشی (Intermediate level)

کاربرد و طیف اثر

محلول ضد عفونی کننده با طیف ضد میکروبی گسترده موثر بر روی انواع باکتری های گرم مثبت و منفی، مایکوباکتریوم ها، قارچ ها، ویروس های پوشش دار و بدون پوشش که در بیمارستان ها، کلینیک ها، مطب پزشکان و دندان پزشکان جهت ضد عفونی کردن سریع و موثر سطوحی که نسبت به آب حساس بوده مانند تجهیزات الکترونیکی، توربین ها، میزهای کار، یونیت های دندان پزشکی و غیره به کار می رود.

مزایا

موثر بر روی کلیه میکروارگانیسم ها
دارای سه نوع الکل به همراه سه نوع از ترکیبات چهارتایی آمونیوم به منظور تسریع در خاصیت میکروب کشی
سهولت در مصرف
سازگاری با سطوح مختلف

مشخصات محصول

مشخصات ظاهری: مایع شفاف، بی رنگ
PH محلول غلیظ: 7.9 +0.2
دانسیته در 20° 0.9 g/cm³

مواد تشکیل دهنده

ایزوپروپانول، اتانول، ترکیبات چهارتایی آمونیوم و مقداری اسانس

روش مصرف

مقداری از محصول بر حسب نیاز از فاصله حدود ۳۰ سانتی متر، روی سطوح مربوطه اسپری شود. در صورت لزوم، به منظور جلوگیری از کدری سطوح باید پس از حدود دو دقیقه با استفاده از یک تمظیف تمیز و خشک، سطح مورد نظر پاک شود.

نکته

این محصول بر روی سطوح حساس به ترکیبات الکلی پاشیده نشود.

نکات ایمنی

در صورت استفاده صحیح مورد احتیاطی خاصی وجود ندارد.
هنگام تماس اتفاقی با چشم و یا پوست موضع را بلافاصله با آب فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه گردد.
(توصیه می شود هنگام مراجعه به پزشک برگه اطلاعات فنی را به همراه داشته باشید).
دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
این محلول قابل اشتعال بوده و از اسپری کردن آن بر روی آتش و یا اجسام داغ خودداری کنید.

بسته بندی

این محلول ضد عفونی کننده در ظروف پلی اتیلن همراه با اسپری در حجم ۵۰۰ سی سی عرضه می شود.

شرایط نگهداری

محصول فوق در ظروف در بسته، دور از مواد قابل احتراق و در دمای اتاق (۲۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد) به مدت ۲ سال قابل نگهداری است.

مواد تشکیل دهنده

اتانول، بنزوآلکانیوم کلراید، پروپانول و مقداری اسانس

روش مصرف

برای کارایی مطلوب، بهتر است ابتدا سطح مورد نظر را با آب تمیز کرده سپس توسط اسفنج و یا زمین شوی که قبلاً تمیز شده باشد، سطوح مورد نظر را ضد عفونی کنید. بدین منظور بهتر است از دو ظرف یکی جهت شستشوی دستمال یا تی کشیف و دیگری جهت آغشته کردن آن ها به ماده ضد عفونی کننده استفاده شود.

نکته

این محصول بر روی سطوح حساس به ترکیبات الکلی پاشیده نشود.

نکات ایمنی

در صورت استفاده صحیح مورد احتیاطی خاصی وجود ندارد.
هنگام تماس اتفاقی با چشم و یا پوست موضع را بلافاصله با آب فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه گردد.
(توصیه می شود هنگام مراجعه به پزشک برگه اطلاعات فنی را به همراه داشته باشید).
دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
این محلول قابل اشتعال بوده و از اسپری کردن آن بر روی آتش و یا اجسام داغ خودداری کنید.

بسته بندی

این محلول ضد عفونی کننده در ظروف پلی اتیلن همراه با اسپری در حجم ۱۰۰۰ سی سی، ۵ و ۱۰ لیتری عرضه می شود.

شرایط نگهداری

محصول فوق در ظروف در بسته، دور از مواد قابل احتراق و در دمای اتاق (۲۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد) به مدت ۲ سال قابل نگهداری است.

پاور سپت سطوح G Powersept

محلول ضد عفونی کننده الکلی آماده به مصرف جهت اسپری کردن بر روی سطوح، ابزار، وسایل پزشکی و دندان پزشکی بدون نیاز به آبکشی (Intermediate level)



کاربرد و طیف اثر

محلول ضد عفونی و پاک کننده با طیف اثر ضد میکروبی گسترده که بر روی باکتری های گرم مثبت و منفی، مایکوباکتریوم ها، یروس های پوشش دار و فاقد پوشش و کپک ها موثر است. این محصول به صورت محلول جهت ضد عفونی کردن کلیه سطوح در بیمارستان ها، کلینیک ها، مطب های پزشکان و دندان پزشکان مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایا

حاوی ترکیبات چهار تایی آمونیوم به همراه اتانول جهت افزایش اثربخشی دارای سورفکتانت برای بهبود خاصیت پاک کنندگی بر روی سطوح

مشخصات محصول

مشخصات ظاهری: مایع شفاف، بی رنگ
PH محلول رقیق و آماده مصرف: 7.9 +0.2
دانسیتته در 20° 0.9 g/cm³

مواد تشکیل دهنده

اتانول، ایزوپروپانول، بنزوآلکانیوم کلراید

روش مصرف

پاورسپت پرپ را قبل از هر گونه تزریق اعم از عضلانی، وریدی و یا زیر پوستی در محل مورد نظر اسپری نمایید. برای ضد عفونی نمودن محل تزریق، محلول را اسپری و تا خشک شدن موضع صبر نمایید. جهت تسریع عمل خشک شدن و یا تمیز کردن پوست، می توان از پنبه تمیز استفاده کرد. همچنین برای انجام جراحی های کوچک بر حسب سطح مورد نظر مقدار کافی از محلول اسپری گردد.

نکات ایمنی

از اسپری کردن محلول فوق بر روی چشم و مخاط باید جداً خودداری شود.
دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
در صورت بروز علائم حساسیت پوستی، به پزشک مراجعه گردد.

بسته بندی

محلول پاورسپت پرپ در ظروف پلی اتیلن ۱۲۵ سی سی عرضه گردد.

شرایط نگهداری

محصول فوق دور از شعله و در دمای اتاق (۲۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد) به مدت ۲ سال قابل نگهداری است.

نائیدیه ها

صنایع، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، دانشگاه شهید بهشتی

پاورسپت پرپ Prep Powersept

اسپری ضد عفونی کننده محل تزریق و جراحی های کوچک



کاربرد

از این محلول می توان برای ضد عفونی پوست جهت انواع تزریقات و انجام جراحی های کوچک استفاده کرد.

مزایا

موثر بر روی انواع باکتری های گرم مثبت و منفی، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، قارچ ها و ویروس ها از جمله HIV و HBV
حاوی دو نوع الکل جهت افزایش اثربخشی به همراه ترکیبات آمونیوم چهارتایی با اثر طولانی مدت
جایگزین مناسب برای استفاده از پنبه الکل در هنگام تزریقات و نمونه گیری های خونی

مشخصات محصول

مشخصات ظاهری: مایع شفاف، بی رنگ

PH: 9 + 0.2

دانسیته در 20° 0.86 g/cm³

مشخصات فنی

در سایزهای مختلف	ابعاد
دستگاه الکترو بولیشینگ	پولیش سطح
Stainless steel grade 304 (ضد اسید)	جنس

اولین تولید کننده انواع دیسپنسرهای دیواری و تختی و انواع نگهدارنده های بیمارستانی با اندازه های مختلف، این محصولات بلا استثنا در تمامی بیمارستان های ایران به چشم می خورد. شرکت رامشین شیمی توانسته در ۱۰ سال اخیر دیسپنسرهای خود را از یک نوع به ۲۲ نوع به طور انحصاری ارتقاء دهد تا بتواند نظر مشتریان را به خود جلب کند.



دیسپنسرها / Dispensers



دیسپنسر طلقی دیواری، حلقه ای

برای تمامی بطری های ضد عفونی



دیسپنسر ABS

دیسپنسر ABS بسیار شکیل بوده و با استقبال زیادی در داخل کشور و کشورهای اطراف مواجه شده است که شرکت رامشین شیمی ساخت مشترک نیم لیتری و یک لیتری این دیسپنسر را آغاز نموده است. این محصول مناسب برای تمامی محلول های داخلی و خارجی طراحی شده است.
سایز: نیم لیتری یک لیتری

دیسپنسر چشمی با نرم افزار میکرو AVR

این دیسپنسر با ثبت اختراع اداره صنایع ساخته شده است. این محصول جدید در صنعت بیمارستانی دنیا بی سابقه بوده و با کارایی بالا توسط متخصصین شرکت طراحی و ساخته شده است. دارای تنظیمات تبدیل قطره به CC و فوق العاده دقیق جهت مصارف بیمارستان ها و آزمایشگاه های دنیا و مراکز بهداشت و درمان کشور.

Ramshin shimi co
CC=2 A

Ramshin shimi co
CC=5 A

Ramshin shimi co
CC=10 A

د کوباکس (ظروف غوطه وری) / Wanne Sterile

اولین سازنده Wanne Strile یا ظروف غوطه وری با کیفیت بالا در خاورمیانه.


جنس این ظروف Polyeten grade ABS می باشد که مقاوم در برابر

واکنش های مواد شیمیایی و تمامی محلول های ضد عفونی کننده ی

ابزار آلات پزشکی است.

این محصول دارای ثبت مالکیت صنایع به شماره ID- 15772 می باشد.

سایز	ارتفاع cm	عرض cm	طول cm
3 LITR	12	18	30
5 LITR	12	20	55
10 LITR	18	29	39
30 LITR	23	40	60

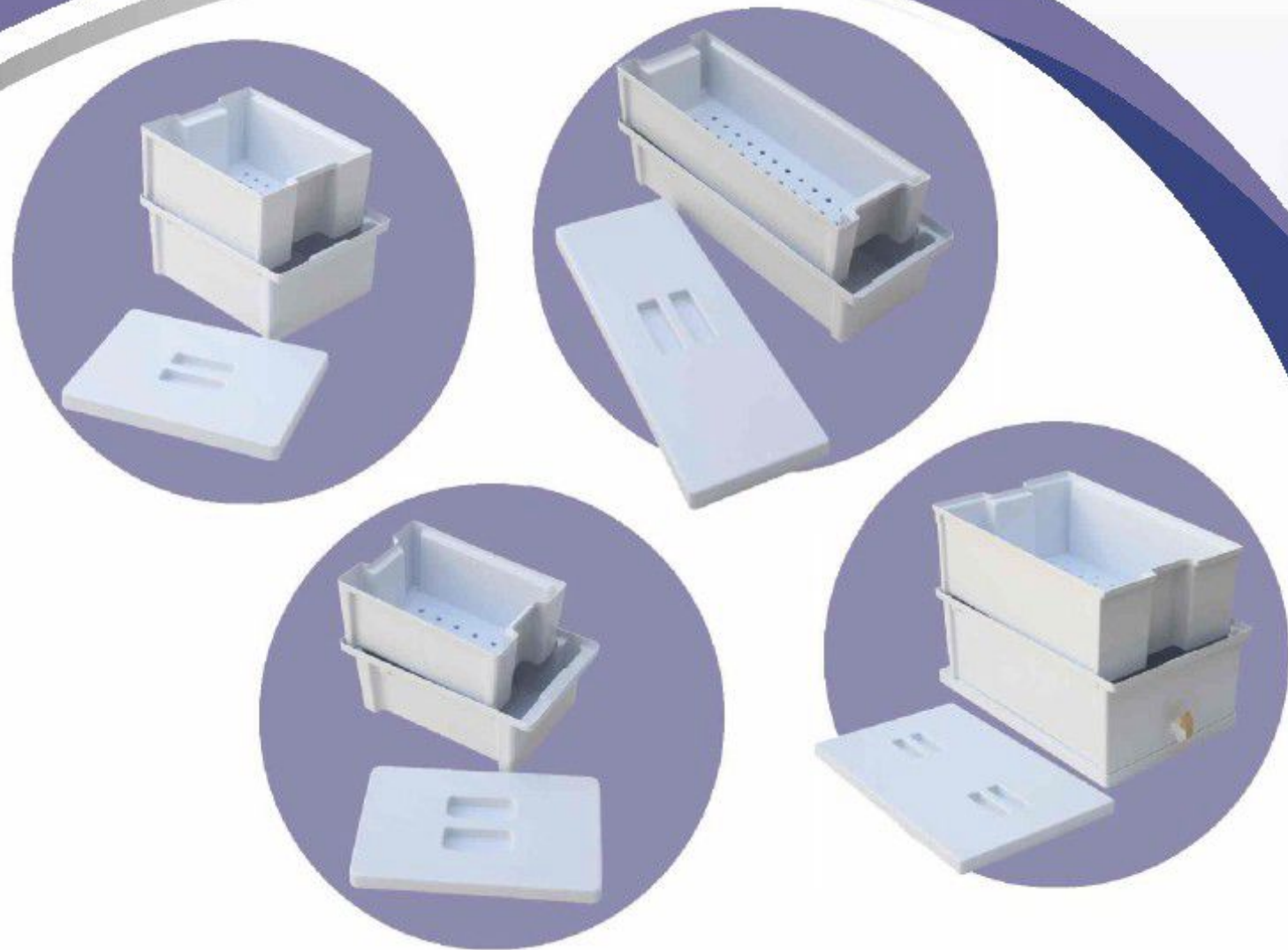

لوازم بسته بندی و پمپ های بیمارستانی

دهانه ۲۴ - دهانه ۲۸ - دهانه ۳۰ - دهانه ۳۲	سایز رینگ
Polyetilen	جنس
cc 5/1	دبی خروجی
gr 26/8 (بدون نی)	وزن
بر طبق سفارش مشتری	رنگ
محلول های ضد عفونی کننده	موارد استفاده

اولین تولید کننده انواع پمپ های رقیق پاش با نازل منقاری و دوشی در ایران که مورد استفاده اکثر شرکت های داخلی و خارجی قرار می گیرد. این پمپ ها با تمام بطری های بیمارستانی سازگاری دارد. نسل جدید این پمپ ها با نازل دوشی که می تواند مایع های رقیق ضد عفونی را به طور همگن اسپری کند وارد بازار گشت و با استقبال خوبی مواجه شد.




سیفتی باکس / Safety Box (NANO TECHNOLOGY)

این محصول سازگار با محیط زیست بوده و به لایه ای اضافه مجهز شده است که از هر گونه لیک کردن مایع و خیس شدن سیفتی باکس مقوایی جلوگیری می کند. یکی از محدودیت هایی که از این سیفتی باکس جدید توسط مصرف کننده به ما اعلام می شد این بود که این محصول فقط قابل استفاده برای زباله های خشک بیمارستانی بوده و نمی توان از آن برای جلوگیری از نشت مایع در زباله های مرطوب بیمارستانی استفاده کرد، اما با اضافه شدن لایه ای ضد رطوبت این مشکل برطرف گشت. این لایه به صورت جداگانه بر روی محصول ارائه می گردد که هیچ تفاوت قیمتی با نسل قبلی سیفتی باکس ندارد.

دارای مجوز ثبت مالکیت با شماره ی ۱۱۴۲۸ ID

سایزها : 5litr 3/5litr 7litr 10litr

همراه با نگه دارنده فلزی تختی و دیواری

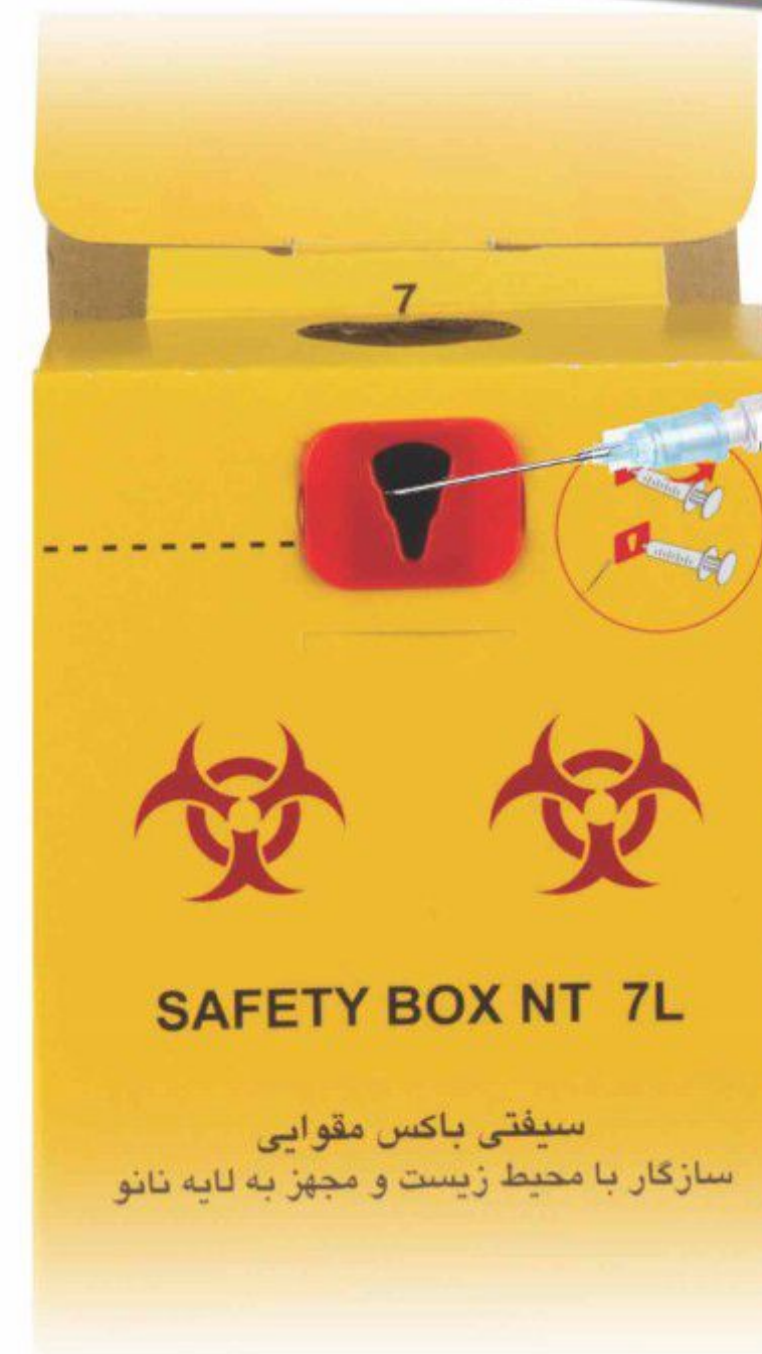



دیسپنسر ها / Dispensers



Ranshin shini co
CC=2 A

Ranshin shini co
CC=5 A

Ranshin shini co
CC=18 A

محصولات جامع شرکت رامشین شیمی
در بخش کنترل عفونت

لوازم بسته بندی و پمپ های بیمارستانی



دکوباکس (ظروف غوطه وری) / Wanne Sterile / سیفتی باکس (NANO TECHNOLOGY) Safety Box





آدرس دفتر: تهران، شهریار، خیابان انقلاب، بن بست ناصح، پلاک ۲۵۸

آدرس کارخانه: تهران، شهرک صنعتی صفادشت، خیابان پولادسازان،
بعد از دانشگاه آزاد، روبروی دیوار شرقی شرکت اورند پیشرو

خط ویژه شرکت: ۰۲۱-۵۴۴۰۷۰۰۰ تلفن شرکت: ۰۲۱-۴۲-۶۵۲۹۹۱۴۱-۶۵۲۹۹۱۴۱

تلفن دفتر فروش: ۰۲۱-۶۵۲۶۶۷۶۲ فاکس: ۰۲۱-۶۵۲۲۷۶۵۱

Web: www.ramshinchemie.ir Email: info@ramshinchemie.ir